

LERNEN SIE IHREN FOCUSEAR KENNEN



* Das Zweitmikrofon ist nicht an allen Modellen vorhanden.

Gewöhnung an neue Geräusche: Mit dem FocusEar können Sie Klänge und Töne wahrnehmen, die Sie vielleicht nicht zu hören gewohnt sind: Alltägliche Geräusche wie eine tickende Uhr, das Rascheln oder Knistern von Papier, Personen, die in Ihrer Nähe flüstern oder sich leise unterhalten, Geräusche im Freien wie Vogelstimmen oder Verkehrslärm oder sich nähernde Schritte. Es kann eine Weile dauern, bis Sie sich an all die neuen Geräusche gewöhnt haben ... anfangs können sie durchaus Verwirrung stiften.

ACHTUNG

BENÖTIGEN SIE ZUSÄTZLICHE HILFE?

Bringen Sie dieses Produkt bitte nicht ins Geschäft zurück.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung oder Ersatzteile benötigen oder wenn Sie Fragen zu unserer

Garantie haben:
www.claratone.de
www.claratone.ch
www.claratone.at

Europäischer Importeur:
Claratone Deutschland Ltd.
Claratone Schweiz
Claratone Österreich



IB/UG/RS1/RS2-GER / 7 © 2013 FocusEar



WWW.FOCUSEAR.COM

FOCUSEARTM
PERSONAL SOUND AMPLIFIER

BEDIENUNGSANLEITUNG



PSA VERSUS HÖRGERÄTE

Auch wenn sich Technik und Funktionen von Hörgeräten und PSA-Hörverstärkern (Personal Sound Amplifier) nur in Teilen gleichen, so ist es unser besonderes Anliegen, Hörverstärker für den Einsatz im privaten und beruflichen Bereich anzubieten, die mit der besten am Markt verfügbaren Hörelektronik ausgestattet sind.


Die FocusEar-Produkte sind bequem, diskret sowie benutzungs- und wartungsfreundlich. Wünschen Sie eine bessere Hörempfindlichkeit oder benötigen Sie Hörunterstützung in lauten Umgebungen? Durch die FocusEar-Geräte wird normales Hören zu hervorragendem Hören, so dass die meisten Menschen Unterhaltungen in sehr lauten Umgebungen verstehen können. Mit FocusEar können Sie Sprache und andere Klänge klarer hören.

WENN SIE VERSTÄRKUNG BRAUCHEN

Durch FocusEar gewinnen Sie eine bessere Hörempfindlichkeit. Dazu stehen bereits Geräte mit High-Tech Qualität zur Verfügung. Sie werden überrascht sein, wie diese Geräte Sie in lauten Situationen unterstützen, sich besser auf die für Sie wesentlichen Geräusche zu konzentrieren, die Sie heraushören möchten. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte und sind deshalb sehr an Ihrer Meinung interessiert, wie wir unsere Geräte noch besser machen können.

REINIGUNG UND WECHSEL DER SCHLÄUCHE

Reinigen Sie Ihren FocusEar nach dem Gebrauch mit einem weichen Tuch, so dass Schmutzpartikel und Feuchtigkeit vollständig entfernt werden. Zur Beseitigung von Schmutz und Ohrenschmalz aus dem Gehörgang und vom Ohrstück wird das Reinigungsinstrument verwendet.

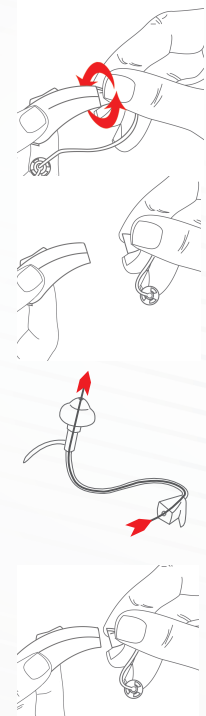

1. Um den Schallschlauch vorsichtig zu entfernen, drehen Sie ihn und halten Sie das Gerät dabei gut fest.
2. Ziehen Sie den Schallschlauch aus dem FocusEar-Gerät.
3. Zur Reinigung des Schallschlauches führen Sie das Reinigungsinstrument an dem Ende mit dem Nasenkegel ein. Schieben Sie das Reinigungsinstrument durch den gesamten Schlauch und das Ohrstück.
4. Um den Schallschlauch wieder anzubringen oder gegen einen anderen auszuwechseln, schieben Sie den Schlauch korrekt ausgerichtet in das Messingverbindungsstück, bis er einrastet.

STROMVERSORGUNG IHRES FOCUSEAR

Der FocusEar benötigt eine Batterie vom Typ 312.

EINSCHALTEN – Öffnen Sie mit dem Finger vorsichtig den Deckel des Batteriefachs. Setzen Sie die Batterie ein und schließen Sie den Deckel. Ihr FocusEar ist mit einer Einschaltverzögerung ausgestattet, so dass Sie mehrere Sekunden Zeit haben, um das Gerät bequem in das Ohr einzusetzen, bevor sich das Gerät einschaltet. Drehen Sie zum Einsetzen der Batterie in Ihr FocusEar-Gerät die Plusseite (+) (bzw. die ganz flache Seite) der Batterie nach oben und legen Sie die Batterie in das Fach ein. Wenn die Batterie richtig eingesetzt ist, lässt sich der Deckel leicht schließen.

Wenden Sie keine Gewalt an, um den Deckel zu schließen.

HINWEIS: Ein zweimaliger Piepton Ihres FocusEar zeigt an, dass die Batterieladung nachlässt.

ACHTUNG: Das Verschlucken von Batterien kann lebensgefährlich sein! Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Stecken Sie Batterien niemals in den Mund, da sie sehr leicht verschluckt werden können. Ziehen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe hinzu, wenn eine Batterie verschluckt worden ist.

AUSSCHALTEN - Zum Entfernen des Geräts fassen Sie einfach den Schlauch in der Nähe des Ohrstücks an und ziehen es aus dem Gehörgang. Entfernen Sie das Gerät anschließend aus dem oberen Teil des Ohrs. Öffnen Sie zum Ausschalten des FocusEar einfach vollständig den Deckel des Batteriefachs. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und sicheren Ort auf.

EINSETZEN IHRES FOCUSEAR

Reinigen Sie vor dem Einsetzen des Geräts bitte Ihr Ohr und überprüfen Sie, dass der Batteriefachdeckel fest geschlossen ist. Gehen Sie zum Einsetzen des FocusEar dann wie folgt vor:



- Halten Sie den Schlauch mit Daumen und Zeigefinger dicht an dem Ohrstück und platzieren Sie das Gerät über dem Ohr. (Abb. A)



- Setzen Sie das Ohrstück vorsichtig in den Gehörgang ein. (Abb. B)



- Bringen Sie die Ohrmuschelhalterung in der Ohrmuschel unter, indem Sie sie anheben und hineinlegen. (Abb. C)


HINWEIS: Wir betonen ausdrücklich, dass PSA-Produkte keine Hörgeräte sind. PSA-Geräte sind nichtmedizinische Hightech-Produkte, die für den situativen Gebrauch durch Personen ohne Hörverlust voreingestellt sind.

LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG

Der Kippschalter dient zugleich als Lautstärkeregler und Modusumschalter. Standardeinstellung ist die Lautstärke-regelung, die wie folgt funktioniert:



Legen Sie bei allen Einstellvorgängen den Daumen an die Ohrmuschel. Legen Sie anschließend Ihren Zeigefinger auf den Kippschalter. (Abb. 1)

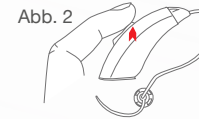

Drücken Sie kurz auf die obere Hälfte des Schalters, um die Lautstärke zu erhöhen (Abb. 2), oder auf die untere Hälfte des Schalters, um die Lautstärke zu reduzieren (Abb. 3). Mit jedem kurzen Druck auf den Schalter ändert sich die Lautstärke etwas.



MODUSEINSTELLUNG

Wenn Ihr FocusEar über mehrere Modi verfügt, befindet sich das Gerät zu Beginn im Modus 1. Um den Modus zu wechseln, halten Sie die obere Hälfte des Kippschalters drei Sekunden lang gedrückt (Abb. 2). Die Anzahl der Pieptöne gibt den jeweiligen Modus an. Die Modi wechseln in der Reihenfolge 1, 2, 3, 1, 2, 3 ... usw.

Wählen Sie den Modus aus, der Ihnen am angenehmsten ist und der den Anforderungen der Umgebung entspricht, in der Sie sich gerade befinden.